


1000 usos con un solo control de DNA

AMPLIRUN®

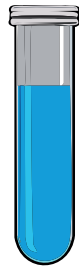


Control de ADN

Volumen: 50 μ l
Rango de concentración: 12,500-20,000 copias/ μ l

25 μ l control puro + 225 μ l tampón TE

1/10 alícuotas diluidas

Almacene a
-20°C

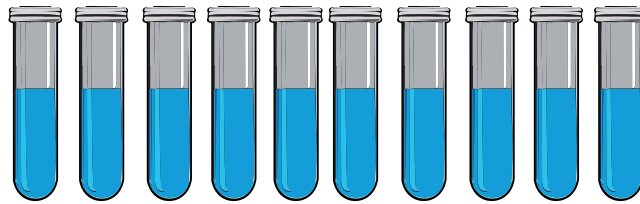

Volumen por alícuota: 25 μ l
Concentración: 1,250-2,000 copias/ μ l
Volumen usado de existencias limpias: 25 μ l



25 μ l control puro + 225 μ l tampón TE



Almacene a
-20°C

25 alícuotas disponibles

Volumen por alícuota: 10 μ l
Concentración: 125-200/ μ l