


# 500 usos con un solo control de ARN

AMPLIRUN®

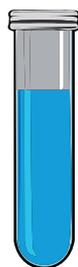


## Control de ARN

Volumen: 50  $\mu$ l  
Rango de concentración: 12,500-20,000 copias/ $\mu$ l

25  $\mu$ l control puro + 225  $\mu$ l tampón TE

1/10 alícuotas diluidas


Almacene a  
-80°C

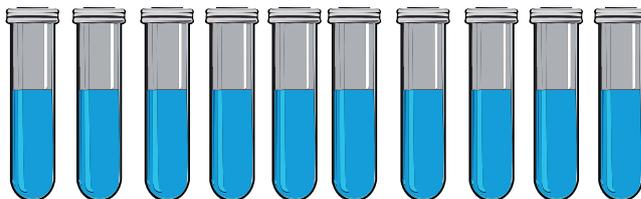

Volumen por alícuota: 25  $\mu$ l  
Concentración: 1,250-2,000 copias/ $\mu$ l  
Volumen usado de existencias limpias: 25  $\mu$ l



25  $\mu$ l control puro + 225  $\mu$ l tampón TE

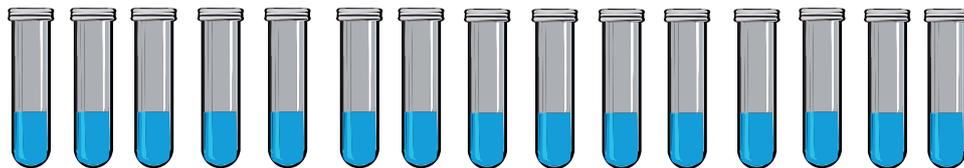

25 alícuotas disponibles

Almacene a  
-80°C



Volumen por alícuota: 10  $\mu$ l  
Concentración: 125-200/ $\mu$ l