


1000 usos con un solo control de ADN

AMPLIRUN®

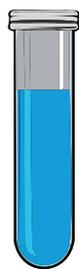


Control de ADN

Volumen: 100 μ l
Rango de concentración: 10,000-20,000 copias/ μ l

20 μ l control puro + 180 μ l tampón TE

1/10 alícuotas diluidas


Almacene a
-20°C

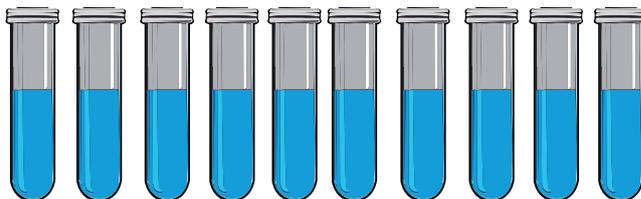

Volumen por alícuota: 20 μ l
Concentración: 1,000-2,000 copias/ μ l
Volumen utilizado del stock original: 20 μ l



20 μ l control diluido + 180 μ l tampón TE

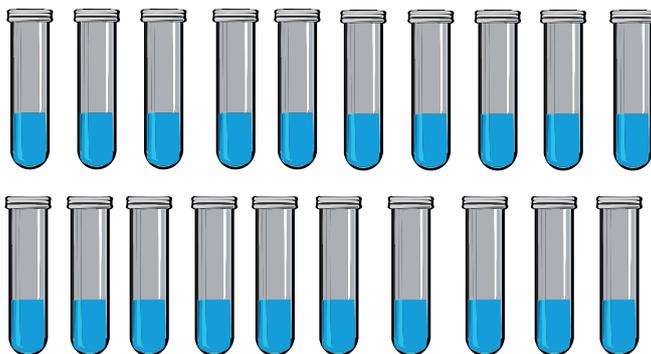

Almacene a
-20°C

20 alícuotas disponibles

Volumen por alícuota: 10 μ l
Concentración: 100-200 copias/ μ l