


500 usos con un solo control de ARN

AMPLIRUN®

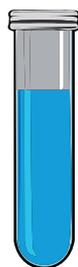


Control ARN

Volumen: 50 μ l
Rango de concentración: 12,500-20,000 copias/ μ l

25 μ l control puro + 225 μ l tampón TE

1/10 alícuotas diluidas


Almacene a
-80°C

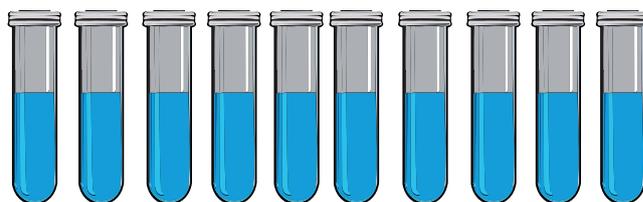

Volumen por alícuota: 25 μ l
Concentración: 1,250-2,000 copias/ μ l
Volumen utilizado del stock original: 25 μ l



25 μ l control diluido + 225 μ l tampón TE

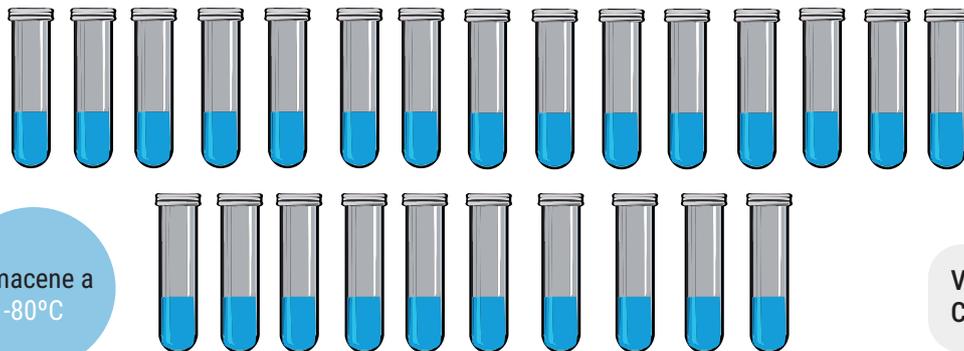

Almacene a
-80°C

25 alícuotas disponibles

Volumen por alícuota: 10 μ l
Concentración: 125-200 copias/ μ l