

AMPLIRUN® ENTEROVIRUS 68 RNA CONTROL

Para utilização em diagnóstico *in vitro*

MBC125: ARN purificado de enterovírus 68 a utilizar para controlo de técnicas de diagnóstico *in vitro* com base na amplificação de ácidos nucleicos.

INTRODUÇÃO:

O enterovírus 68 é um vírus não envelopado ssARN. Ao contrário de todos os outros enterovírus, o EV-68 apresenta labilidade a ácidos e uma baixa temperatura ótima de crescimento, ambas características dos rinovírus humanos. Era antigamente chamado de rinovírus humano 87 por alguns investigadores. O EV-68 pode causar doença respiratória ligeira a grave.

CARACTERÍSTICAS:

O ácido nucleico liofilizado está incluído num saco em folha de alumínio termicamente selado, que contém um saco de gel de sílica. É necessário proceder à reconstituição antes da utilização (consulte "Preparação dos reagentes").

Preparação: Cultivado em células MRC-5 infetadas.

Preparação para a extração: Método de extração comercial de ARN genómico.

CONTEÚDO DO KIT:

1 VIRCELL ENT68 RNA CONTROL: 1 frasco com ARN liofilizado do enterovírus 68, (estirpe F02-3607 Corn), (12500-20000 cópias/μl após reconstituição (consulte a Tabela 1)). A quantificação de ARN foi realizada por uma PCR em tempo real.

2 VIRCELL CONTROL RECONSTITUTION SOLUTION: 500 μl de água de grau de biologia molecular, sem DNase e RNase.

| | |
|----------------|-----------|
| Número de lote | |
| Concentração | cópias/μl |

Tabela 1.

Materiais necessários mas não fornecidos:

Kit de diagnóstico adicional.

REQUISITOS DE CONSERVAÇÃO:

Não são necessárias condições de transporte especiais. Conservar o frasco liofilizado entre 2 e 8 °C dentro do saco em folha de alumínio. Depois de aberto o saco, reconstituir imediatamente o frasco liofilizado e conservar entre -70 °C e -90 °C após a reconstituição (temperatura indicada na etiqueta).

ESTABILIDADE E UTILIZAÇÃO DOS REAGENTES:

Utilizar todos os reagentes em condições de assepsia, de modo a evitar contaminações microbianas.

Utilizar apenas a quantidade de reagente necessária para o teste.

Após a ressuspensão de controlo, a solução de ARN deve ser dividida em alíquotas para evitar múltiplos ciclos de congelação e descongelação. O produto está estável até à data

de validade indicada na etiqueta, se as instruções de utilização forem seguidas.

A VIRCELL, S.L. não se responsabiliza pela utilização inadequada dos reagentes contidos no kit.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

1. Este produto destina-se apenas à utilização em diagnóstico *in vitro* e por profissionais qualificados.
2. As pontas esterilizadas com proteção contra aerossóis são essenciais para evitar a contaminação.
3. As amostras devem ser manuseadas como se se tratassem de amostras infecciosas utilizando procedimentos laboratoriais de segurança. Limpe e desinfete cuidadosamente todas as superfícies de trabalho com uma solução acabada de preparar de hipoclorito de sódio a 0,5% em água desionizada ou destilada.
4. Para realizar o teste é essencial ter áreas de trabalho separadas.
5. Elimine reagentes e resíduos não utilizados de acordo com os regulamentos aplicáveis.
6. O componente VIRCELL RNA CONTROL poderá incluir material genético ou substâncias de origem animal e/ou humana. VIRCELL RNA CONTROL contém ácidos nucleicos de enterovírus 68 inativado. VIRCELL RNA CONTROL contém ácidos nucleicos purificados obtidos de microrganismos desativados, devendo, mesmo assim, ser considerado potencialmente infeccioso e manuseado com cuidado. Nenhum método atual pode oferecer uma garantia total de que estes ou outros agentes infecciosos não estão presentes. Todos os materiais devem ser utilizados e eliminados como potencialmente infecciosos. Cumpra os regulamentos legais relativamente à eliminação de resíduos clínicos.
7. As diluições inferiores a 1000 cópias/μl devem ser realizadas imediatamente antes da utilização. O congelamento de diluições do produto com menos de 1000 cópias/μl não é recomendado, pois pode ocorrer a degradação parcial de ARN.

PREPARAÇÃO DOS REAGENTES:

1. Rasgue o saco em folha de alumínio que contém o VIRCELL RNA CONTROL 1.
2. Centrifugue o VIRCELL DNA CONTROL 1 durante 1 minuto a 1000 g.
3. Adicione 50 μl de VIRCELL CONTROL RECONSTITUTION SOLUTION 2 e misture até estar completamente reconstituída. A concentração será de 12500-20000 cópias/μl após reconstituição (consulte a Tabela 1).
4. Agite com o vórtex durante 30 segundos para dissolver e homogeneizar completamente.
5. É recomendável preparar alíquotas do VIRCELL RNA CONTROL. No caso de preparação de diluições, utilize VIRCELL CONTROL RECONSTITUTION SOLUTION 2 para este efeito.

EXECUÇÃO DO TESTE:

Após a reconstituição do ácido nucleico, utilize-o de acordo com as indicações do kit de diagnóstico adicional. Utilize VIRCELL CONTROL ressuspendido como uma amostra clínica extraída adicionando-a diretamente a reagentes de amplificação.

CONTROLO DE QUALIDADE INTERNO:

Cada lote encontra-se sujeito a um teste de controlo de qualidade interno, antes do seu envio. A análise do controlo de qualidade é realizada por uma PCR em tempo real. Os



resultados finais do controlo de qualidade para cada lote particular encontram-se disponíveis.

INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO PARA UTILIZADORES:

Consulte as indicações do kit de diagnóstico adicional.

LIMITAÇÕES DE MÉTODO:

1. Este reagente destina-se a ser utilizado com métodos de diagnóstico humano. Este teste não foi verificado com outros métodos.
2. O utilizador deste kit é aconselhado a ler cuidadosamente e a compreender o folheto incluso. É necessário cumprir rigorosamente o protocolo para obter resultados de teste fiáveis.
3. A utilização deste produto deve estar limitada apenas a pessoal com formação em técnicas moleculares.
4. O teste de identidade foi executado por alguns iniciadores específicos de acordo com as sequências publicamente disponíveis do micro-organismo. As alterações nas sequências dos iniciadores da reação podem produzir uma gama de tamanhos diferentes ou podem não apresentar amplificação do produto.
5. Este controlo não substitui os controlos do kit de diagnóstico interno.
6. A quantificação foi executada pela qPCR da nossa própria marca em relação a um padrão usado como calibrador. Os resultados podem variar com as condições de amplificação do utilizador final.
7. AMPLIRUN® não foi concebido para ser usado com qualquer kit de diagnóstico de um certo fabricante. É utilizado para controlar a amplificação de um procedimento funcional de um laboratório de diagnóstico.

PERFORMANCES:

• TESTE DE IDENTIDADE

Análise RT-PCR de controlo de ARN: A análise RT-PCR foi executada com um oligopar específico em ARN do enterovírus 68 purificado. A reação produziu um fragmento de tamanho igual ao esperado.

• TESTE DE QUANTIFICAÇÃO

A quantificação baseia-se em qPCR em tempo real utilizando o método de curva padrão. Este método envolve a utilização de várias réplicas de diferentes diluições em série, tanto do produto como do padrão de quantificação.







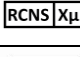

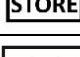
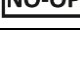
• PRECISÃO INTRAENSAIO

3 réplicas de 3 diluições em série de 3 frascos do produto foram amplificadas pelo mesmo operador em condições de PCR em tempo real. Observou-se um coeficiente de variação inferior a 10% entre todos os ensaios.

• PRECISÃO INTERENSAIO

3 réplicas de 3 diluições em série de 1 frasco do produto foram amplificadas individualmente pelo PCR em tempo real por 2 operadores diferentes em 3 dias consecutivos. Observou-se um coeficiente de variação inferior a 10 % entre todos os ensaios.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NAS ETIQUETAS:

| | |
|---|--|
|  | Dispositivo médico para diagnóstico in vitro |
|  | Utilizar até (data de validade) |
|  | Conservar entre X-Y °C |
|  | Código do lote |
|  | Número de catálogo |
|  | Consultar instruções de utilização |
|  | Reconstituir em x µl |
|  | Temperatura de envio |
|  | Temperatura de conservação |
|  | Não abrir até usar |

BIBLIOGRAFIA:

1. Oberste MS, Maher K, Schnurr D, Flemister MR, Lovchik JC, Peters H, Sessions W, Kirk C, Chatterjee N, Fuller S, Hanauer JM, Pallansch MA. (2004). Enterovirus 68 is associated with respiratory illness and shares biological features with both the enteroviruses and the rhinoviruses. J Gen Virol. 2004 Sep;85(Pt 9):2577-84.
2. Bustin SA. (2000). Absolute quantification of mRNA using real-time reverse transcription polymerase chain reaction assays. J Mol Endocrinol. 25(2):169-193.
3. Bustin SA. (2002). Quantification of mRNA using real-time reverse transcription PCR (RT-PCR): trends and problems. J Mol Endocrinol. 29(1):23-39.
4. Freeman WM, Walker SJ, Vrana KE. (1999). Quantitative RT-PCR: pitfalls and potential. Biotechniques. 1999 26(1):112-122, 124-125.
5. Larionov A, Krause A, Miller W. (2005). A standard curve based method for relative real time PCR data processing. BMC Bioinformatics. 6:62.

Para mais esclarecimentos, contactar:

customerservice@vircell.com

EDIÇÃO 2019-15-01
L-MBC125-PT-01

